



Suprasorb®

Modern Yara Tedavisinde Profesyonel Çözüm



Kurtsan Medikal

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Lohmann&Rauscher GmbH

- Kurtsan Medikal, 1998 yılından beri sağlık ürünleri alanında dünya çapında söz sahibi uluslar arası bir firma olan L&R'in Türkiye'deki tek yetkili temsilciliğini yürütmektedir.
- Yıllık cirosu 400milyon € 'yu aşan L&R'in 80 ülkede temsilcilikleri ve 6 ülkede fabrikaları bulunmaktadır.
- L&R, modern yara bakım ürünleri de dahil olmak üzere 2.000 adetin üzerinde ürün çeşidine sahiptir.
- Yara bakım, kompresyon tedavisi, ameliyat odası ürünleri, ortopedi, dermatoloji, oftalmoloji, hasta hijyeni gibi birçok alanda ürünleri bulunmaktadır.



Kurtsan Medikal



Yara Bakımı

Yara tedavisine başlamadan önce ilk olarak yapılması gereken işlem yaranın tipi ve akıntı şiddetini belirlemektir.


Yaranın derinliği ve yarada yer alan dokunun durumu göz önüne alınmalıdır.

İyileşme ile dokunun durumu ve yaranın derinliği değişir. Bu nedenle her pansuman değişiminde yaranın durumu değerlendirilmeli, kullanılan sargıların etkinliği izlenmeli ve yara tedavisi için en etkin malzeme seçilerek uygulanmalıdır.




Kurtsan Medikal

Kuru Yaranın İyileşmesi

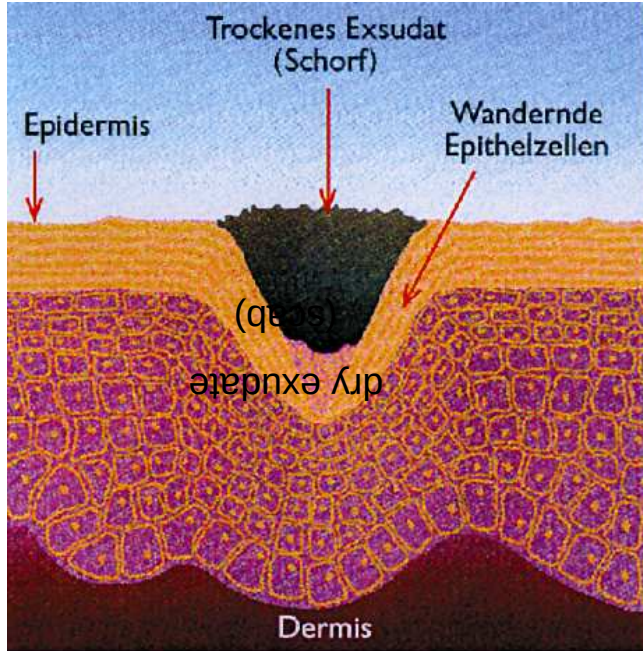

- Yara kabuğu oluşumu
- Kabuk kolayca koparılabilir (travma)
- Yeni oluşan hücreler yara kabuğuyla beraber ciltten ayrılır
- Mikroorganizma ve sıvılara karşı bir bariyer oluşturmaz
- Sıcaklık dengede tutulamaz
- İyileşme süreci uzar





Modern Yara Tedavisi

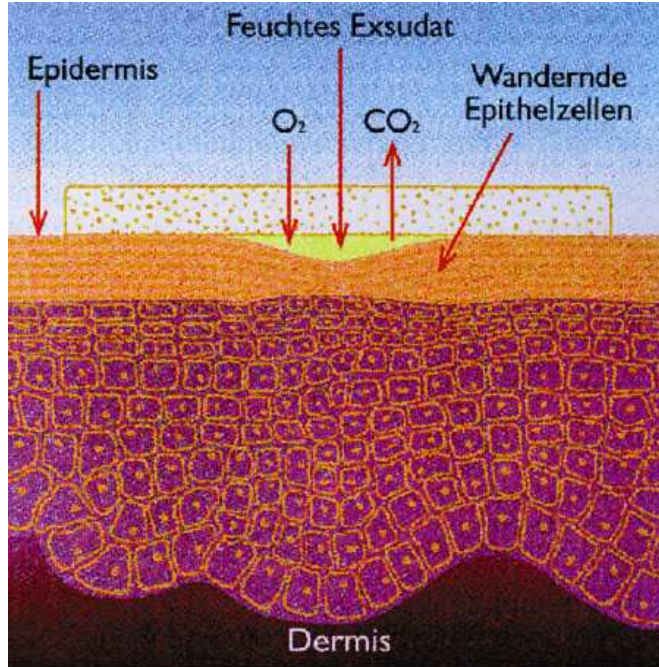


- Fazla eksüdayı kontrol eder
- Mikroorganizma ve sıvıların geçişine izin vermez
- Yaranın hava almasına izin verir
- Travmaya sebep olmadan sargı değişimini mümkün kılar
- Epitel hücrelerin rahatlıkla çoğalmasına izin verir
- Sıcaklığı dengeler
- Kozmetik ve psikolojik açıdan da rahatlatıcı sonuç alınmasına izin verir

İyileşme süreci

- **Eksüdasyon fazı**
(Yaranın temizlenmesi)
 - nekroz, kabuk, mikro-organizma
- **Granülasyon fazı**
(Yeni doku oluşumu)
 - nemlilik, iyi dolaşımı işaret eden kırmızı granülasyon dokusu
- **Epitelizasyon fazı**
(Yaranın kapanması)
 - Yaranın dış kısımlarında oluşan yumuşak, pembe renkli epidermal hücreler

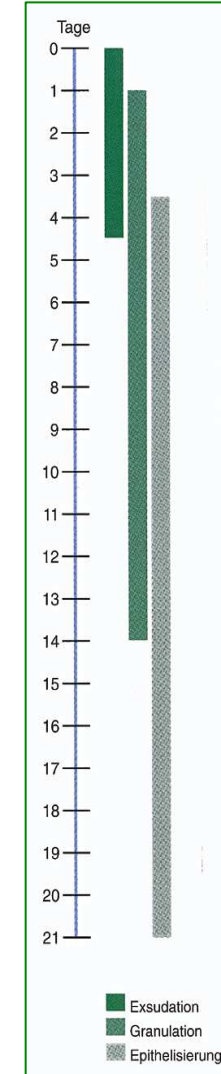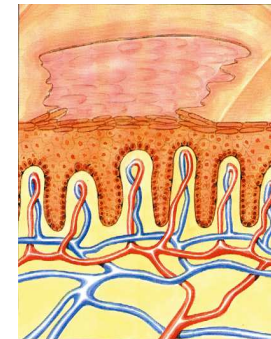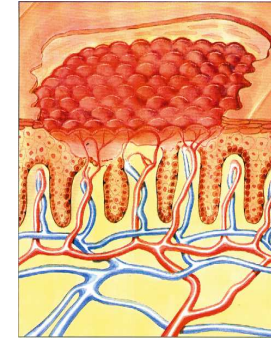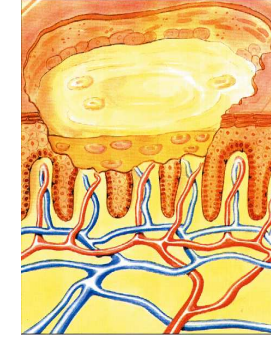

Yaranın Durumları

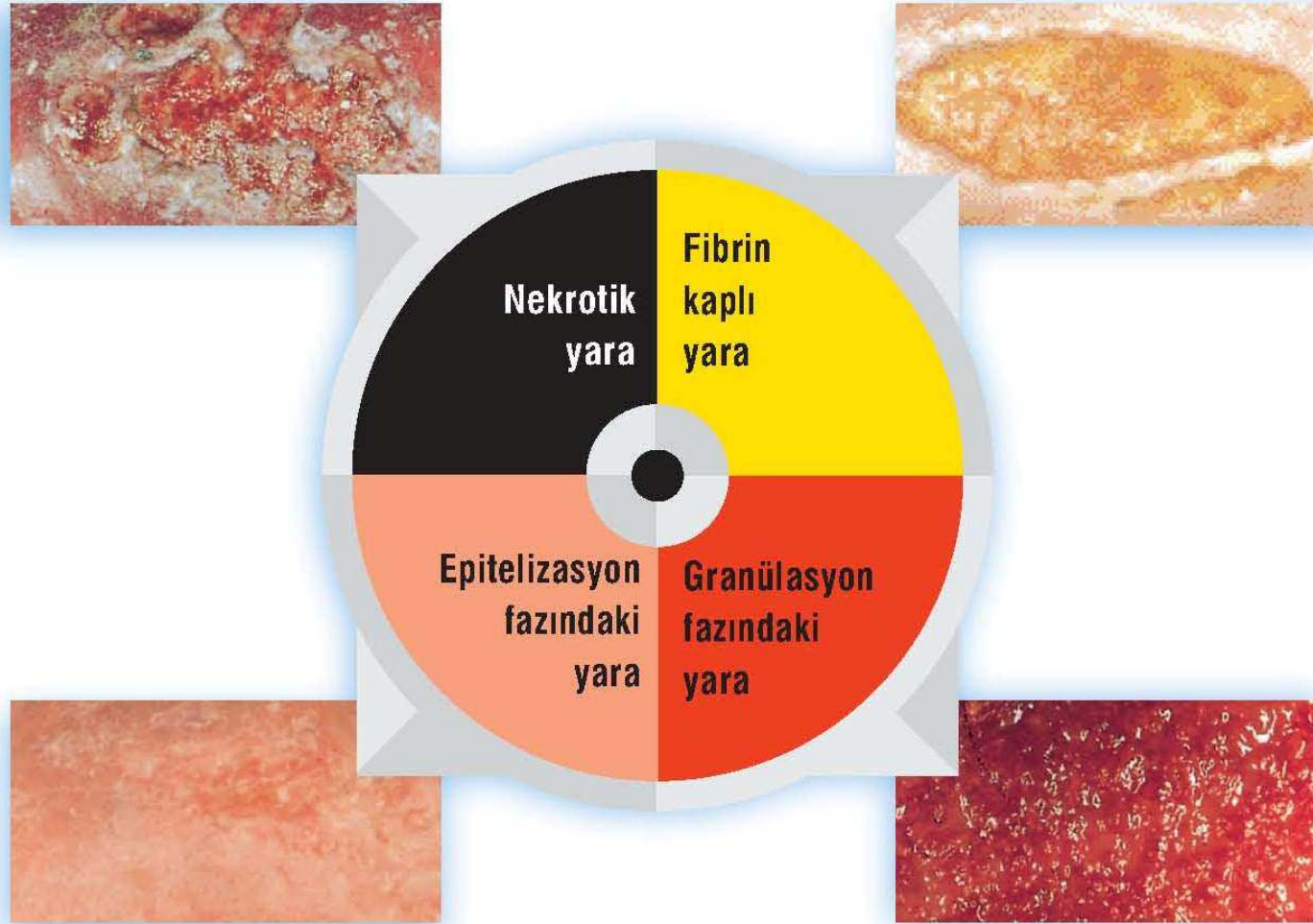



Suprasorb

Modern Yara Tedavi Ürünleri

Suprasorb® – yaraları profesyonelce tedavi eder.

	Suprasorb®	A	Aljinat	
★	Suprasorb®	A	+ Ag Aljinat enfekte yaralar için	
★	Suprasorb®	X	+ PHMB HidroBalans enfekte yaralar için	
	Suprasorb®	C	Kollajen	
	Suprasorb®	P	PU Köpük Örtü	
	Suprasorb®	H	Hidrokolloid	
	Suprasorb®	F	Film	
	Suprasorb®	G	Hidrojel	



Suprasorb® A + Ag

Enfekte yaralar için

Gümüş İçerikli

Aljinat Yara Örtüsü



Yaralar için doğal temizlik!

Suprasorb® A

**Yara bakımında
temizleyici etki.**

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® A+Ag

Bileşimi

İyonik gümüş içerikli ve doğal su yosunlarından elde edilen kalsiyum aljinat lifleri

„nasıl etki ediyor ? „

1) eksüda yönetimi:

- yaradaki eksüda ile temas ettiğinde, eksüda içinde bulunan sodyum emilir ve yerine gümüş iyonları yaraya salınır => sonuçta jel formasyonu oluşur.

2) bakteri yönetimi:

- yaraya gümüş iyonları salınır => antimikrobial aktivite gerçekleşir.

3) sargı değişimi / çıkarılması:

- oluşan jel kompleksinin içinde kan partikülleri, ölü bakteriler, hücre artıkları ve gümüş kalıntıları sargı değişimi ile birlikte yaradan uzaklaştırılır.

Bu sayede bakteriler, etkin şekilde azaltılır




Kurtsan Medikal



Suprasorb® A+Ag

İşleyişi

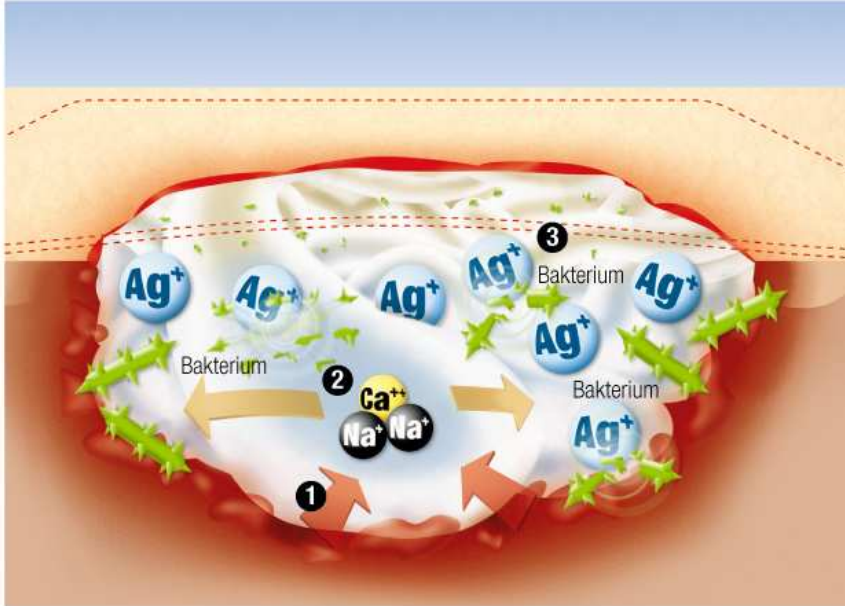

- 1 Eksüda yara örtüsü tarafından emilir
- 2 İyon değişimi ile jel formasyonu oluşur
- 3 Gümüş iyonlarının salınmasıyla bakteriler yok edilir



Suprasorb® A+Ag

Doğal emme kapasitesi ve antimikrobiyal etkili gümüş

■ Suprasorb® A 'nın kanıtlanmış özellikleri ...

- doğal bir malzeme oluşu
- yüksek emme kapasitesi
- hızlı jel formasyonu
- yara yüzeyine uygulama için mükemmel yumuşaklık**
- yara yüzeyine uyum gösterme
- jel yapısı, bakteriler ile bağ oluşturur ve yarayı temizler

... Gümüşün antimikrobiyal etkisi ile birleşince

- Geniş antimikrobiyal etki spektrumu
- MRSA ve VRE'ye karşı etkinlik
- Bakteri ve mikroplar jel içine hapsedilir, yara ortamına salınan gümüş iyonları tarafından yok edilir ve pansuman değişimi ile yaradan uzaklaştırılır

** Ürünümüzdeki yüksek oranlı M(Malluron) aljinatı, yüksek oranda G(Gulluron) aljinatı içeren ürünlere göre çok daha yumuşak ve hastayı rahat ettirici yapıdadır.




Kurtsan Medikal



Suprasorb® A+Ag

ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİK

Aşağıdaki grafik bakterilerin Suprasorb® A+Ag tarafından etkin şekilde azaltıldığını göstermektedir:

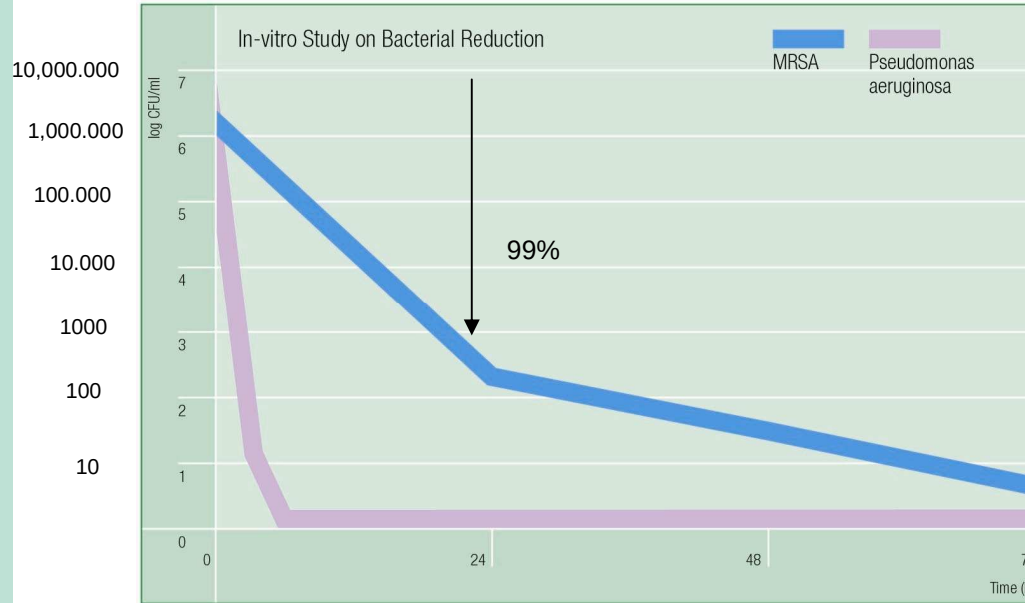

•MRSA

•Pseudomonas aeruginosa

Elde edilen avantajlar:

- yaradaki enfeksiyonun etkin kontrolü
- tedavi süresinin kısalması
- maliyetleri düşürülmesi

24 saat içinde, bakterilerin en az 99%'u yok edilmiştir.



Suprasorb® A+Ag

Kullanım Yerleri

- Enfekte ve kritik derecede kolonize olmuş yaralar
- ağır eksüdalı yaralar

e.g.

- dekübite ülserleri
- değişik orjinli ülserler
- diyabetik ayak yaraları
- postoperatif yaralar
- cilt greft ve donör sahaları
- 2. derece yanıklar

Pansuman değişim sıklığı:

Enfeksiyonun durumuna, eksüdasyonun yoğunluğuna ve ikinci örtü olarak kullanılan ürüne bağlı olarak, en az 5-7 günde bir
(7 güne kadar kanıtlanmış – fakat pratikte hiçbir doktor bu denli uzun süre ürünü enfekte yara üzerinde tutmaz.)



Kurtsan Medikal



Suprasorb® A+Ag

YENİ

Ürün Gami

Antimikrobiyal Gümüş İçerikli Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü



Örtü formu, steril, tek tek ambalajlanmış

Boyut	L&R REF	Kurtsan Medikal Ürün Kodu	Kutu / Koli İçeriği
5 x 5 cm	20570	133406	10 adet / 15 kutu
10 x 10 cm	20571	133407	10 adet / 5 kutu
10 x 20 cm	20572	133408	5 adet / 4 kutu

Şerit formu, steril, tek tek ambalajlanmış

Boyut	L&R REF	Kurtsan Medikal Ürün Kodu	Kutu / Koli İçeriği
30 cm, 2 g	20573	133409	5 adet / 4 kutu

Saklama sıcaklığı: en yüksek. 25°C

Raf ömrü: 3 yıl



Kurtsan Medikal

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® A+Ag

Örnek Kullanım Yerleri



Karma bacak ülseri, ağır
eksüdasyonlu, enfekte
(diabetes mellitus,
lymphedema)



Venöz bacak ülseri,
ağır eksüdasyonlu,
enfekte; (CVI)




DAS,
Diyabetik ayak
sendromu
Ağır eksüdasyonlu,
enfekte (diabetes
mellitus)



Suprasorb® X+PHMB (PolyHexaMethylene Biguanide)

Antimikrobiyal Etkili ve HİDROBALANS ESASLI Yeni Nesil Yara Örtüsü

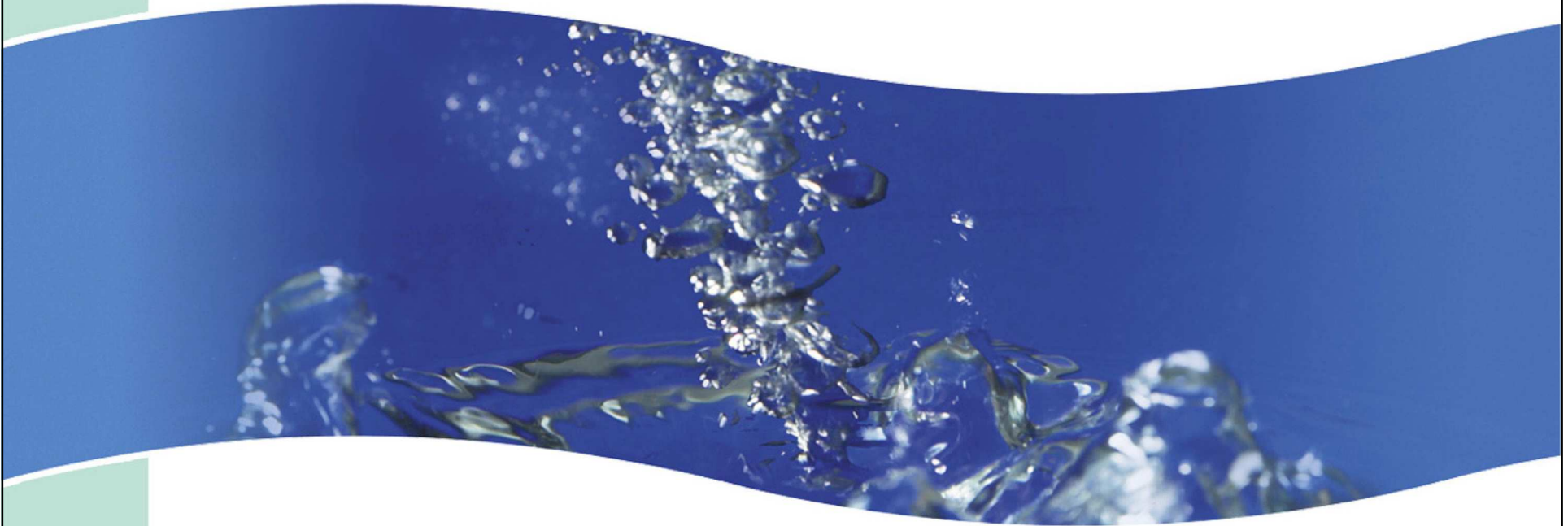

- ✓Doğal Hidrobalans.
- ✓Kolay uygulama
- ✓Eşsiz özellikler



Kurtsan Medikal

Suprasorb® X +PHMB

Aktif Nem Dengesi Kuran
Akıllı Yara Bakım Sistemi

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® X+PHMB

Antimikrobiyal Etkili Hidrobalans Esaslı Yara Örtüsü



BİLEŞİMİ:

- Biyosentetik Selüloz Esaslı HİDROBALANS Örtü
- Su
- 0.3% PHMB / polyhexanide (polyhexamethylene biguanide)



Kurtsan Medikal

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® X+PHMB

Antimikrobiyal Etkili Hidrobalans Esaslı Yara Örtüsü



Hidrobalans:

Aynı anda

- hem yaradaki nemi emerek
- hem de kuru bölgeleri nemlendiren

akıllı yara bakım sistemi,

yanarın devamlı ideal nemli ortamda kalmasını sağlar.



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X + PHMB

Biyosentezle Elde Edilen Hidrobalans Lifleri

Baz ürün: **Acetobacter X ylinum**

- „xylum“ adı Yunancadaki Xylos = ağaç/selüloz – kelimesinden gelmektedir, bu nedenle ürün adında “X” kullanıldı
- Bakteriler besleyici solüsyon içerisinde yetiştirildikten sonra parçalanarak özel saf selüloz lifleri haline getirildi.
- Böylece üç boyutlu bir yapıya sahip biyosentetik Hidrobalans lifleri oluşturuldu.

Sonuçta aynı anda yarayı hem nemlendirip, hem de fazla nemi emerek aktif nem dengesi sağlayan, akıllı yara bakım ürünü Suprasorb X+PHMB ortaya çıktı.




Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

„nasıl çalışır?“

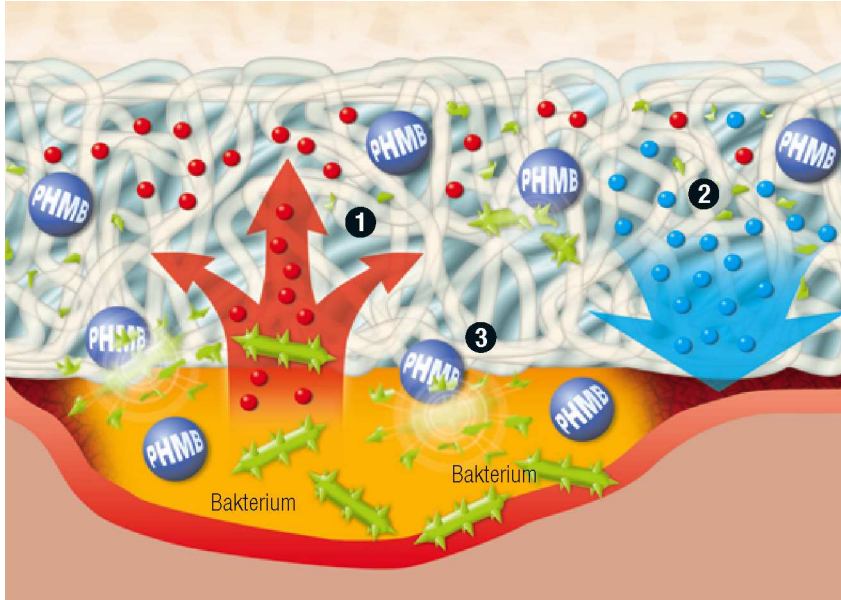

Eksüda emilimi ve nem salınımı,
ideal nemli ortamı devamlı dengeliyor.

eksüda kontrolü

1 Fazla eksüda yaradan emilerek Suprasorb X+PHMB' nin içine hapsedilir.

2 Suprasorb X+PHMB 'de bulunan nem, az eksüdalı yara bölgesine salınır.

bakteri kontrolü

3 mikro-organizmalar polyhexamethylene biguanide (PHMB) tarafından yok edilir.




Kurtsan Medikal



Suprasorb® X + PHMB

Eşsiz HidroBalans Sistemi

... varolan diğer yara bakım ürün grupları ile nem dengeleme özelliği karşılaştırıldığında:

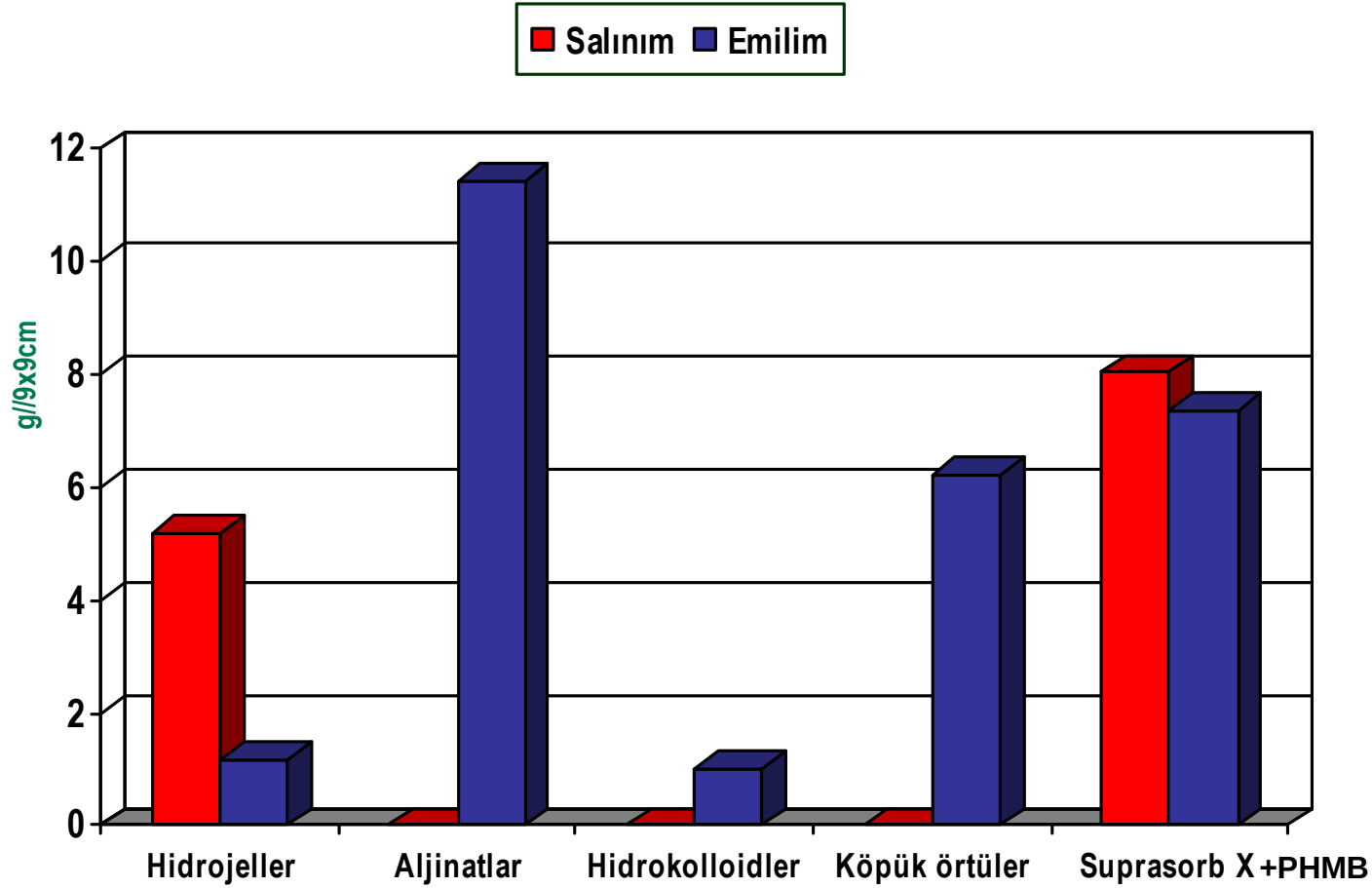

* Nemlendirme ve emme dengeli!



Suprasorb® X + PHMB

Eşsiz HidroBalans Sistemi

Yaranın ihtiyacına bağlı olarak

Suprasorb® X çok az eksüdalı (akıntılı) ve kuru yaraları nemlendirir,

veya

Suprasorb® X fazla az-orta-yüksek eksüdalı (akıntılı) yaralardaki fazla sıvıyı emer,

veya

her ikisini aynı anda yapar (karma yaralar için mükemmel bir etki)



- doğru ürünü aramaya gerek kalmaz, tek ürünle yara tedavisi yapılabilir
- ihtiyaç duyulan ürün sayısını azaltır
 - kolay tedavi ve uygulama
 - uygulama esnasında yüksek güvenlik
 - maliyetleri düşürme

Örnek çalışmalar verimli bir tedavi prosesinin elde edildiğini gösteriyor.



Kurtsan Medikal




Suprasorb® X + PHMB

Nemli yapısı sayesinde yarada duyulan acıyı azaltır

Suprasorb® X+PHMB ile yapılan klinik deneylere göre

- Uygulama boyunca, kendine has aktif nem kontrol özelliği sayesinde acıyı azaltır.

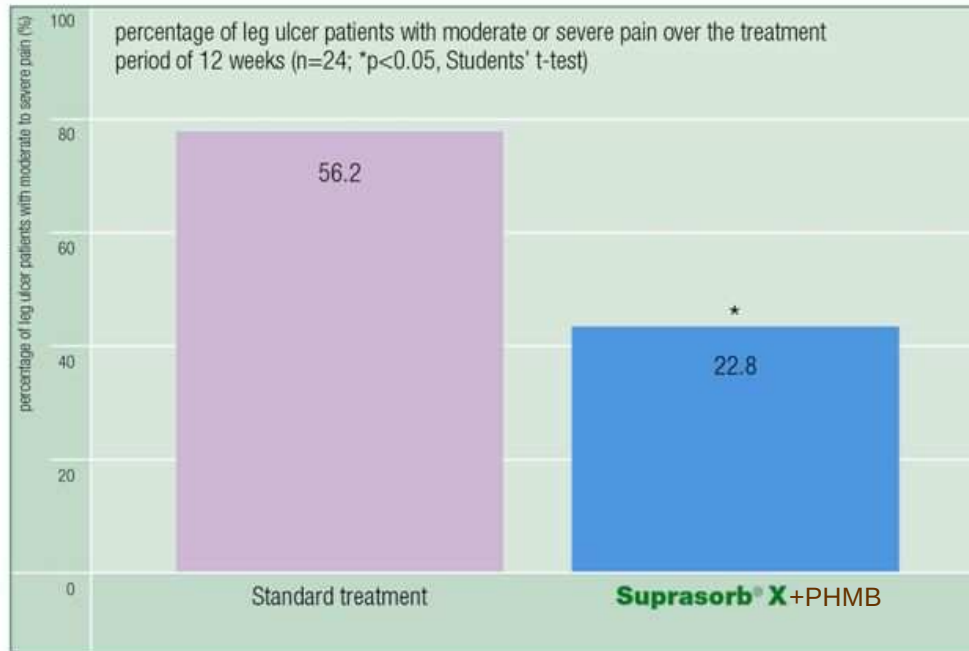

Grafikte standart tedavi uygulanan hastaların yarısından çoğunda orta ve yüksek derecede acı olduğu, buna karşın Suprasorb X+PHMB ile tedavi edilen hastaların sadece %22.8'inde orta ve yüksek derecede acı olduğu görülmüştür.



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X + PHMB

- Sizce yaranın ikinci resimdeki gibi iyi görünümüne kavuşması ne kadar zaman almış olabilir?



1



2



Suprasorb® X + PHMB

- Sizce yaranın ikinci resimdeki gibi iyi görünümüne kavuşması ne kadar zaman almış olabilir?



1



2

... İki günden az!



Suprasorb® X + PHMB

Yarayı yıkama etkisi

- Suprasorb® X+PHMB 'yi yara kenarlarını kapatacak şekilde uyguladığınızda, ölü epitel hücreleri nemlendirilir. Böylece pansuman değişimi sırasında ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı olur.



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X + PHMB

Yarayı yıkama etkisi

- Yara çevresinin temizlenmesiyle, nemlendirilen ölü epitel hücreleri yaradan uzaklaştırılır.

Önce:

Yara çevresini saran beyazımsı tabaka



Sonra:

Yara çevresini bir bütün olarak saran epitel doku



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

Antimikrobiyal Madde PHMB 'nin Avantajları

- PHMB, alerji yapmaz
- PHMB'ye bilinen bir direnç yoktur
- PHMB, insan hücrelerine zarar vermez
- PHMB, daha büyük moleküler yapıya sahiptir => neredeyse insan vücudu tarafından hiç emilmez
- PHMB, yara üzerinde çok daha fazla kalabilir – toksik değildir!
- PHMB, karma yaralarda da kullanılabilir




Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

MRSA and VRE mikroplarına karşı Antimikrobiyal etkinlik

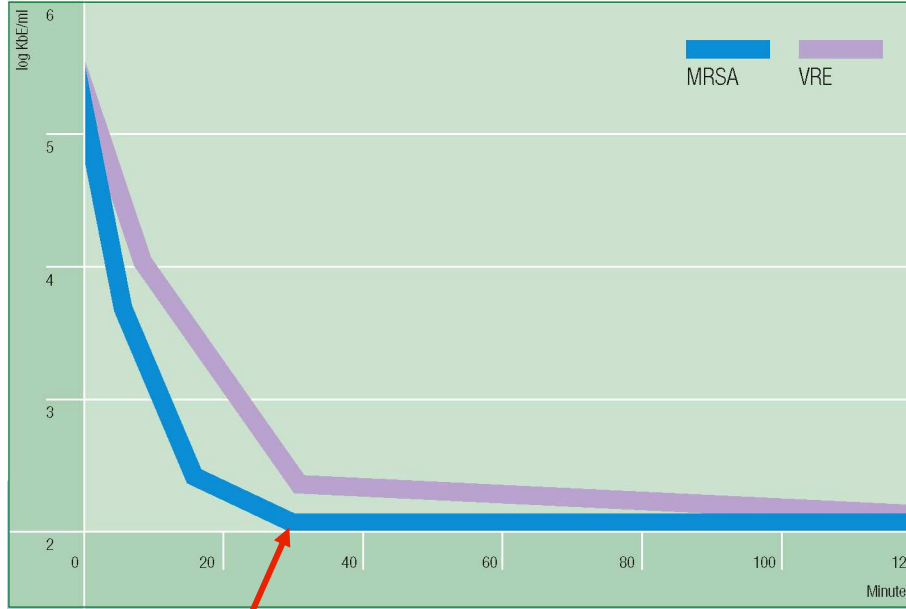

Yandaki grafik Suprasorb X+PHMB 'in MRSA ve VRE mikroplarına karşı hızlı antimikrobiyal etkinliğini göstermektedir.

30 dakikada: Suprasorb X+PHMB
MRSA popülasyonunu 99.9% oranında azaltır.



Kurtsan Medikal

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® X+PHMB

Suprasorb® X ‘in Eşsiz Avantajları

- aynı anda hem nemlendirebilme, hem de yaradan çıkan eksüdayı emebilme özelliği
- tüm uygulama boyunca acıyı azaltması
- “yıkama etkisi ” – yara kenarlarındaki ölü hücreleri kaldırarak cilt bölgesine bakım sağlaması
- yumuşak, konforlu ve dağılmadan duran stabil yapısı
- kolay uygulanabilmesi, her iki tarafının uygulanabilmesi ile yanlış uygulamayı önlemesi
- tüm yara çeşitleri için tek bir ürün/konsept

PHMB ‘in antimikrobiyal etkisi ile birleştirildiğinde elde edilen ekstra avantajları

- geniş antimikrobiyal spektruma sahip olması
- MRSA ve VRE mikroplarına karşı hızlı etkinlik göstermesi
- insan vücuduna yük getirmeden daha uzun zamanlı periyotlarda tedavi olasılığı



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

Kullanım Yerleri

Enfekte olmuş - kritik kolonizasyon oluşmuş veya enfekte olmamış aşağıdaki yaralarda

- az ve orta derece eksüdalı
- yüzeysel veya derin

Ör :

- dekübite yaraları
- değişik nedenlerle oluşan ülser yaraları
- 2. derece yanıklar
- postoperatif yaralar
- cilt nakli bölgeleri



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

Kullanışlı Bilgiler

....ilk bakışta yüksek görünen fiyatına rağmen, aşağıdaki özellikleri ile daha ekonomiktir:

- | | |
|---|--|
| •karma yaralar için | => daha az maliyet
(bir yara için sadece bir ürün) |
| •yarada 7 güne kadar kalabilme | => daha az maliyet
(daha az ürün kullanımı) |
| •soğutma etkisi (anında ve sürekli acıyı hafifletme) | => daha az maliyet
(daha az ağrı kesici kullanımı) |
| •daha hızlı iyileştirme | => daha az maliyet |
| •Tüm yara çeşitleri için kullanımı kolay konsept (enfekte olmuş veya olmamış) | => daha az maliyet
(daha az hata = daha az maliyet)
„tüm yaralarda tek ürün“ |

Hasta uyumu ve iyileştirme hızı gözle görülür şekilde artacaktır!

- önerilen saklama koşulları : 5-30° C
- raf ömrü: 3 yıl



Kurtsan Medikal



Suprasorb® X+PHMB

YENİ

Antimikrobiyal HidroBalans Yara Örtüsü

Örtü Formu, steril, tek tek ambalajlanmış

Boyut	REF	Kutu / Koli içi adet
5 x 5 cm	20540	5 ad. / 90 ad.
9 x 9 cm	20541	5 ad. / 80 ad.
14 x 20 cm	20542	5 ad. / 65 ad.

Şerit Formu, steril, tek tek ambalajlanmış

Boyut	REF	Kutu / Koli içi adet
2 x 21 cm	20543	5 ad. / 130 ad.



Kurtsan Medikal

TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR


www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr



Suprasorb® X+PHMB ve A+Ag

Yeni kolay konsept

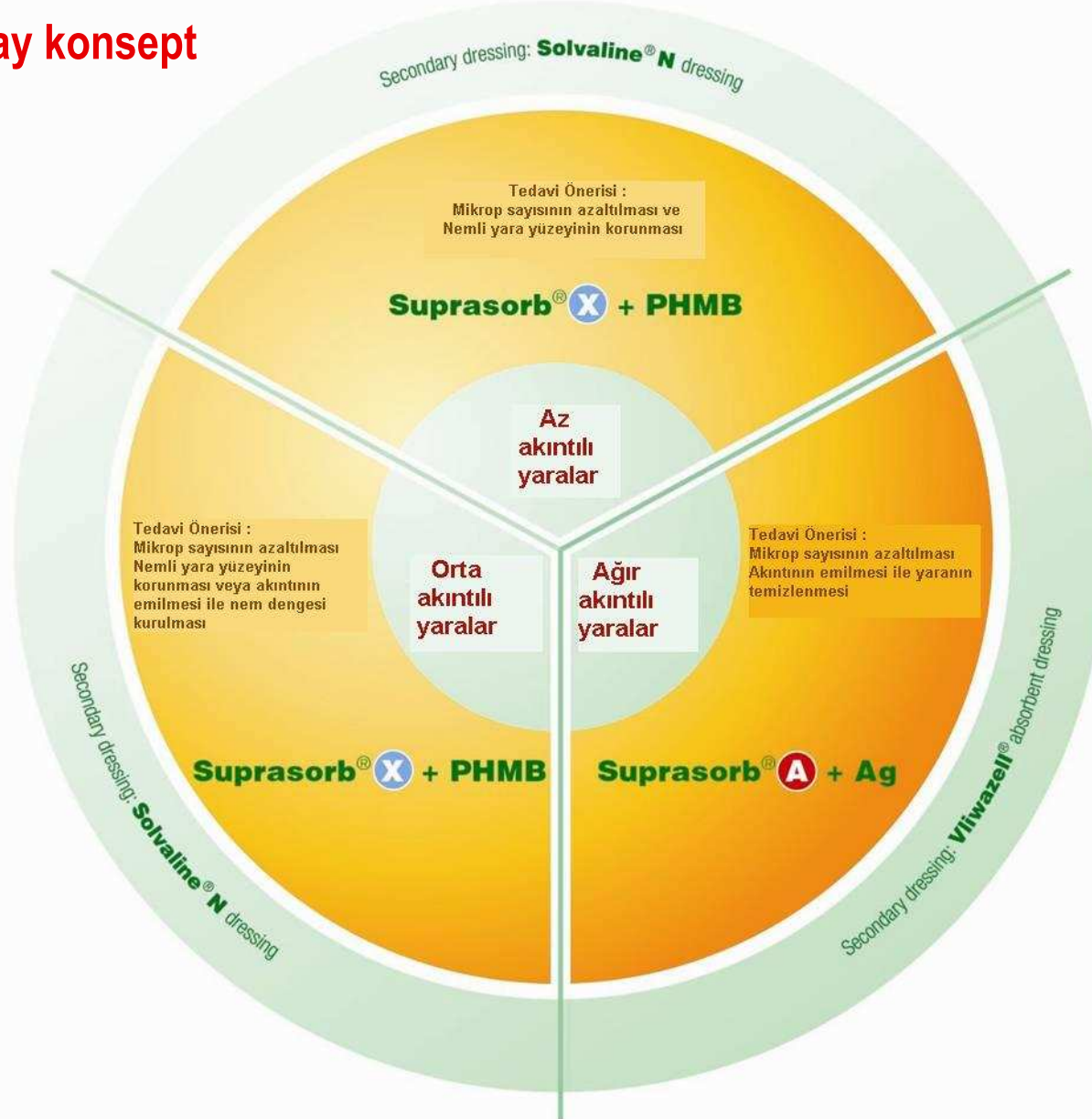

Kurtsan Medikal


TEDAVİ EDER · KORUR · BAKIM SAĞLAR

www.lohmann-rauscher.com

www.kurtsanmedikal.com.tr

Diğer Nemli Yara Örtüleri

Suprasorb® – yaraları profesyonelce tedavi eder.

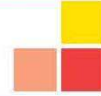Suprasorb®		Aljinat	
Suprasorb®		Kollajen	
Suprasorb®		PU Köpük Örtü	
Suprasorb®		Hidrokolloid	
Suprasorb®		Film	
Suprasorb®		Hidrojel	




Suprasorb

Modern Yara Tedavi Ürünleri



Suprasorb® A Kalsiyum Aljinat

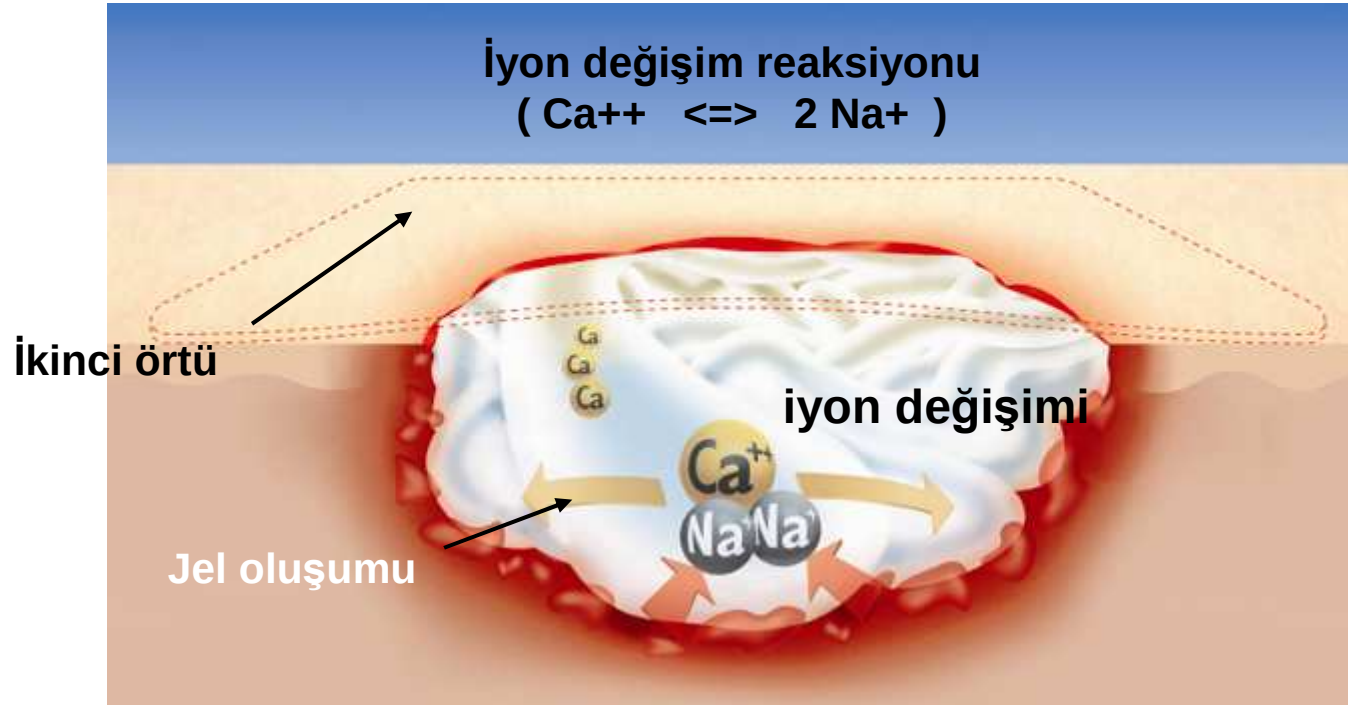

1. Yaradaki fazla eksüda(akıntı) Suprasorb A tarafından emilir.
2. Yarada bulunan Na (sodyum) iyonları ile üründe bulunan Ca (kalsiyum) iyonlarının deęişim reaksiyonu sonucunda jel oluşur. Bu jel yaradaki bakterileri ve artıkları içine hapseder.



Suprasorb® A Kalsiyum Aljinat



Ürünün avantajları

- Doğal içerikli oluşu
(Kahverengi okyanus yosunlarından elde edilen aljinat fiberleri)
- Yumuşak yapıda olması
- Yüksek miktarda eksüdasyon emebilmesi
- Yarayı nemli tutarak iyileşmeyi destekleyen mikro ortam sağlaması
- Jelin oluşumu ile bakterilerin emilmesi ve yaradan uzaklaştırılması
- Yaraya yapışmaması ve travmasız sargı değişimi



Suprasorb® A Kalsiyum Aljinat

Kullanım yeri

- Ağır akıntılı,
- Yüzeysel veya derin, Eksüdasyon veya granülasyon fazındaki yaralarda Ör:
 - Dekübit yaraları
 - Çeşitli sebeplere dayalı ülserler (Ör: venöz, arteriyel)
 - Diyabetik ayak sendromu (DAS)
 - Cilt greft ve donör bölgeleri
 - Postoperatif yaralar
 - İkinci derece yanıklar



Kurtsan Medikal



Suprasorb


Modern Yara Tedavi Ürünleri



Kurtsan Medikal



Suprasorb® P Poliüretan Köpük Örtü

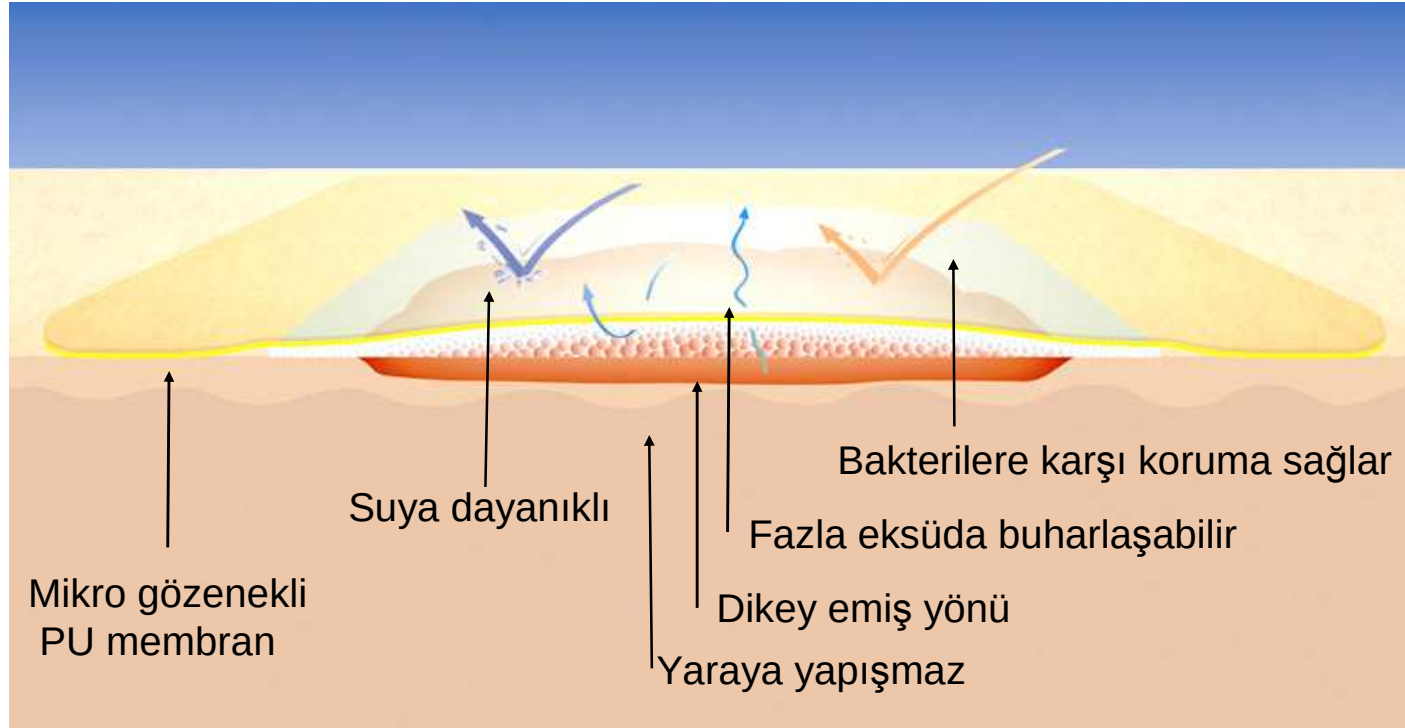

1. Yaradaki fazla eksüdayı hızlıca emerek şişer ve yara yüzeyine temas eder.
2. Bakterileri ve sıvıyı yaraya geçirmez.
3. Fazla nem buharının yaradan uzaklaşmasına izin verir.



Suprasorb® P Poliüretan Köpük Örtü

Ürünün Avantajları

- Yarayı ideal nemli ortamda tutması
- Dikine emiş özelliği ile eksüdayı dağıtmaması ve maserasyonu engellemesi
- Kullanımı rahat ve yumuşak olması
- Optimum yapışma gücü
- Kolay uygulama, rahatça taşıma





Suprasorb® P Poliüretan Köpük Örtü

Kullanım Yeri

- Orta dereceli akıntısı olan,
- Yüzeysel,
- Enfekte olmamış,
tüm yara tiplerinde Ör:
 - Dekübit yaraları
 - Çeşitli sebeplere dayalı ülserler (Venöz, arteriyel ülserler gibi)
 - Diyabetik ayak sendromu (DAS)
 - Cilt greft ve donör bölgeleri
 - Postoperatif yaralar
 - İkinci derece yanıklar



Kurtsan Medikal



Suprasorb


Modern Yara Tedavi Ürünleri



Kurtsan Medikal



Suprasorb® H Hidrokolloid Örtü

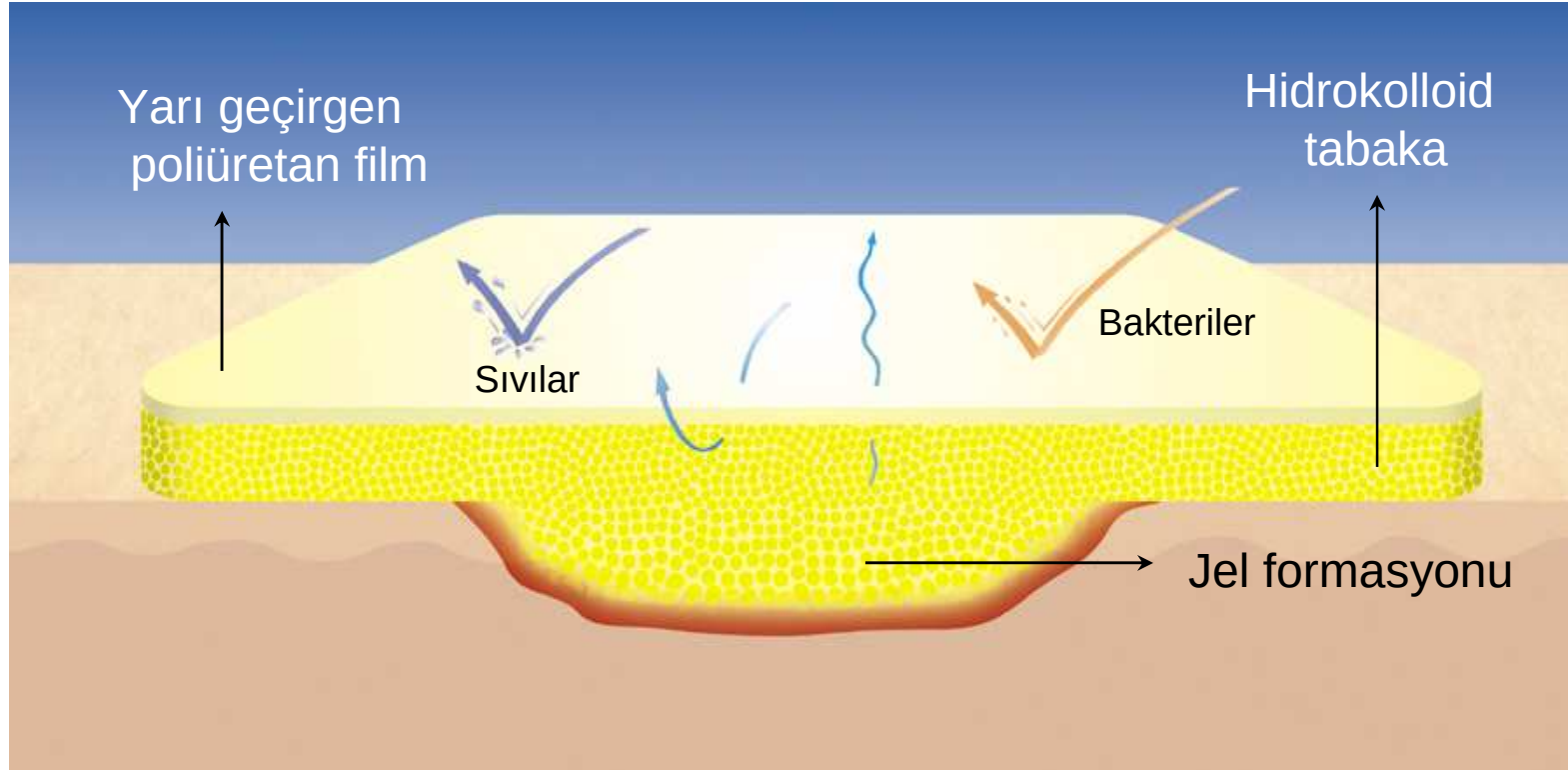


1. Hidrokolloid eksüdayı emdikçe şişer ve jel oluşturarak eksüda ile birlikte yara artıklarını kendi içine hapseder.
2. Bakterileri ve sıvıyı yaraya geçirmez.
3. Fazla nem buharının yaradan uzaklaşmasına izin verir.



Suprasorb® H Hidrokolloid Örtü

Ürünün Avantajları

- İyi emme özelliği
- Kolay ve güvenli uygulama için optimum yapışma gücü
- Düşük yara içi jel dağılımı
- İnce ve esnek yapı
- Bakteri ve sıvıları yaraya geçirmeme özelliği
- Duş alma ve yıkanma imkanı sunması

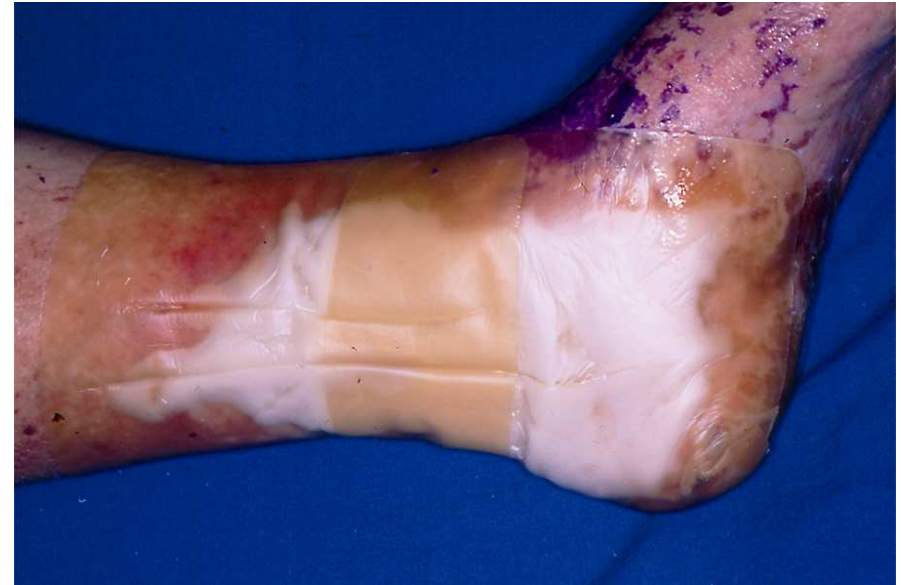



Suprasorb® H Hidrokolloid Örtü

Kullanım Yeri

- Az ve orta dereceli akıntısı olan,
- Yüzeysel,
- Enfekte olmamış, tüm yara tiplerinde, Ör:
 - Dekübit yaraları
 - Çeşitli sebeplere dayalı ülserler (Ör: venöz, arteriyel)
 - Diyabetik ayak sendromu (DAS)
 - Akıntılı sıyrıklar
 - Cilt greft ve donör bölgeleri
 - Postoperatif yaralar
 - İkinci derece yanıklar






Suprasorb

Modern Yara Tedavi Ürünleri





Suprasorb® F Film Yara Örtüsü

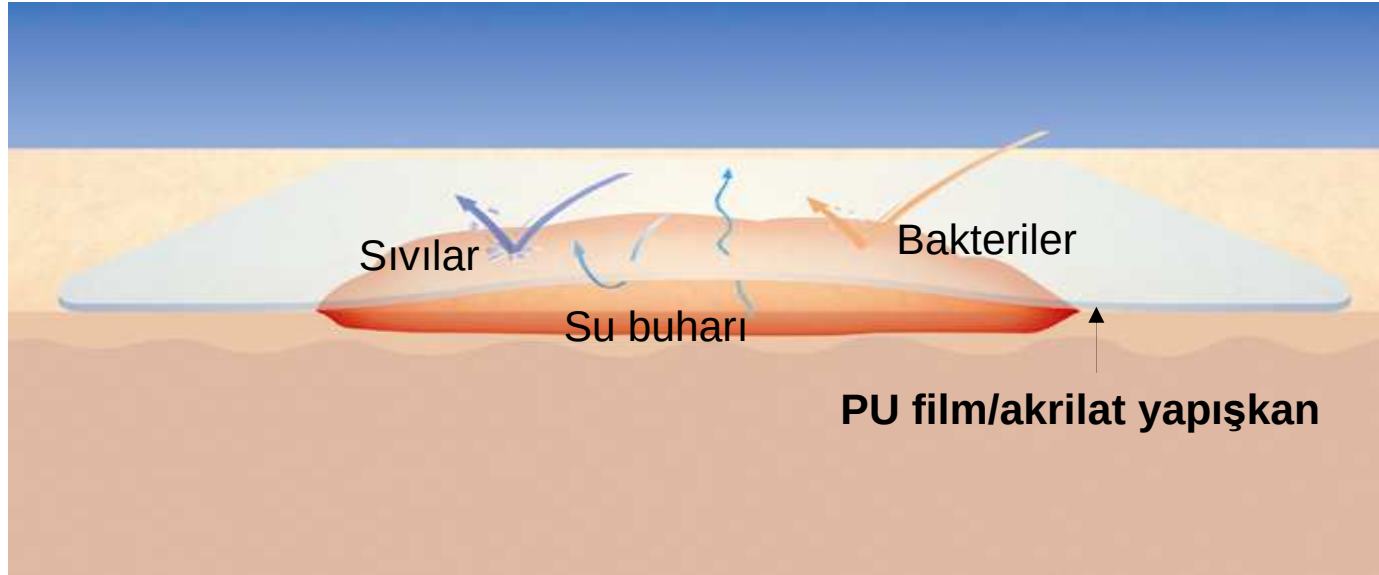


1. Şeffaf yarı geçirgen poliüretan film.
2. Bakterileri ve sıvıyı yaraya geçirmez.
3. Fazla nem buharının yaradan uzaklaşmasına izin verir.



Suprasorb® F Film Yara Örtüsü

Ürün avantajları

- Şeffaflık, yaranın izlenmesine imkan vermesi
- Optimum yapışma gücü
- Elastik ve yırtılmaya dayanıklı olması
- Hava geçirgen oluşu
- Sıvı ve bakteri geçirmemesi
- Kolay kullanım ve rahat taşınabilme
- Yıkanma ve duş alma imkanı sağlaması

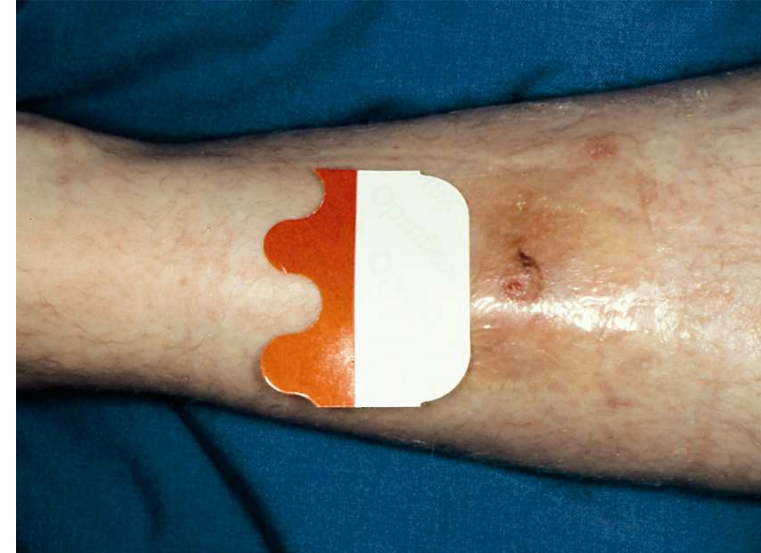



Suprasorb® F Film Yara Örtüsü

Kullanım yeri

- Az akıntılı veya akıntısız,
- Yüzeysel,
- Enfekte olmamış, tüm yara tiplerinde, Ör:
 - Sıyrıklar
 - Cilt donör bölgeleri
 - Ülserler
 - Dekübit yaraları
 - Diyabetik ayak sendromu (DAS)
 - İkinci derece yanıklar
 - Postoperatif yaralar
 - Kanül sabitleyici olarak
 - Kateter ve drenaj tüpleri için
- Diyaliz pansumanlarında
- Kanül sabitleyici olarak
- Kateter ve drenaj tüpleri için



Kurtsan Medikal




Suprasorb® F Film Yara Örtüsü - Rulo





Suprasorb® F Film Yara Örtüsü - Rulo

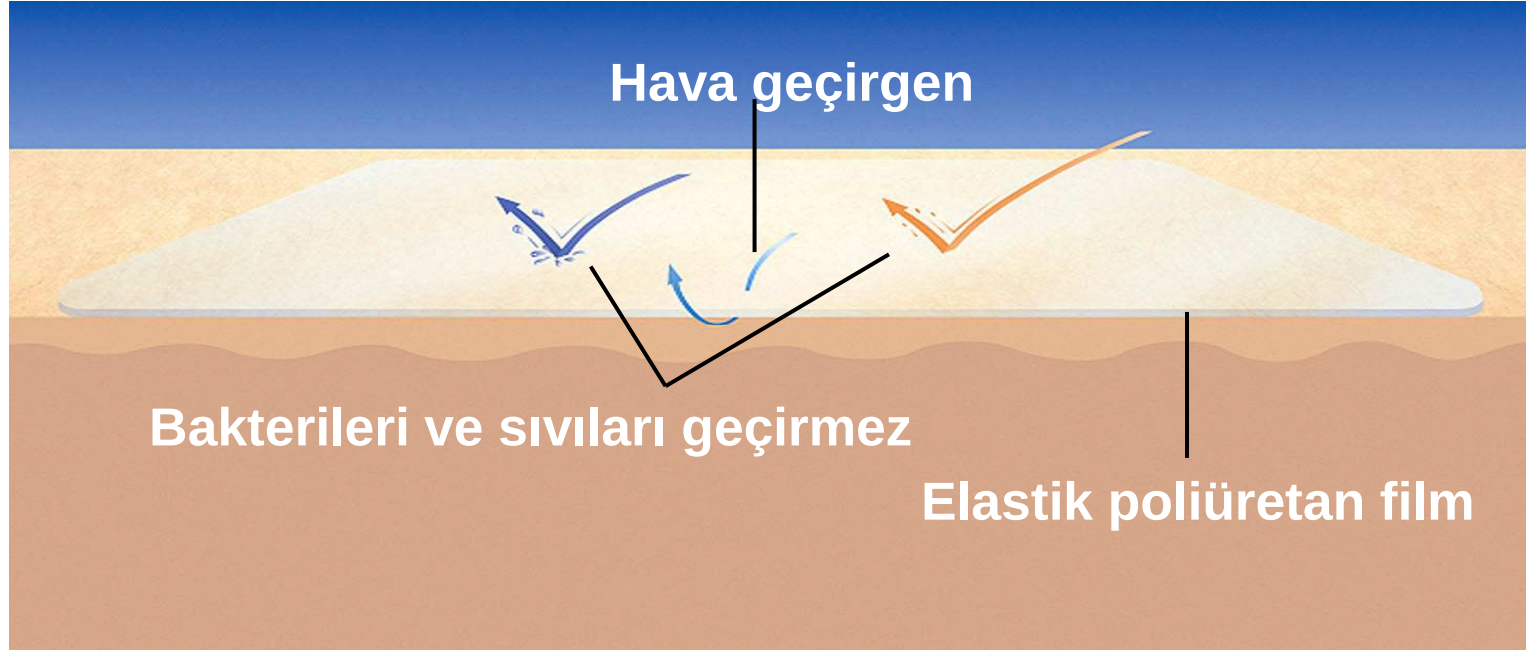

1. Şeffaf yarı geçirgen poliüretan film.
2. Bakterileri ve sıvıyı yaraya geçirmez.
3. Steril olmayan rulo formu ekonomiktir, kesilerek ihtiyaç kadar kullanılabilir.



Suprasorb® F Film Yara Örtüsü - Rulo

Ürün avantajları

- Şeffaflık
- Hava geçirgen
- Enfeksiyona karşı etkin koruma
- Uygulama kolaylığı
- Kullanım rahatlığı
- Bakterileri ve sıvıları geçirmeme
- Ekonomik olması





Suprasorb® F Film Yara Örtüsü - Rulo

Kullanım yeri

- Koruma ve sabitleme amacı ile
 - Dekübite ülserinde profilaksiyi (hastalığı önlemek için) desteklemede
 - Yara çevresini maserasyondan korumak için
 - Yara sargılarını korumak amacı ile ikincil örtü olarak
 - Merhemli sargıları korumak için (gazlı bezi sabitlemede)






Suprasorb

Modern Yara Tedavi Ürünleri





Suprasorb® G Jel Sargı

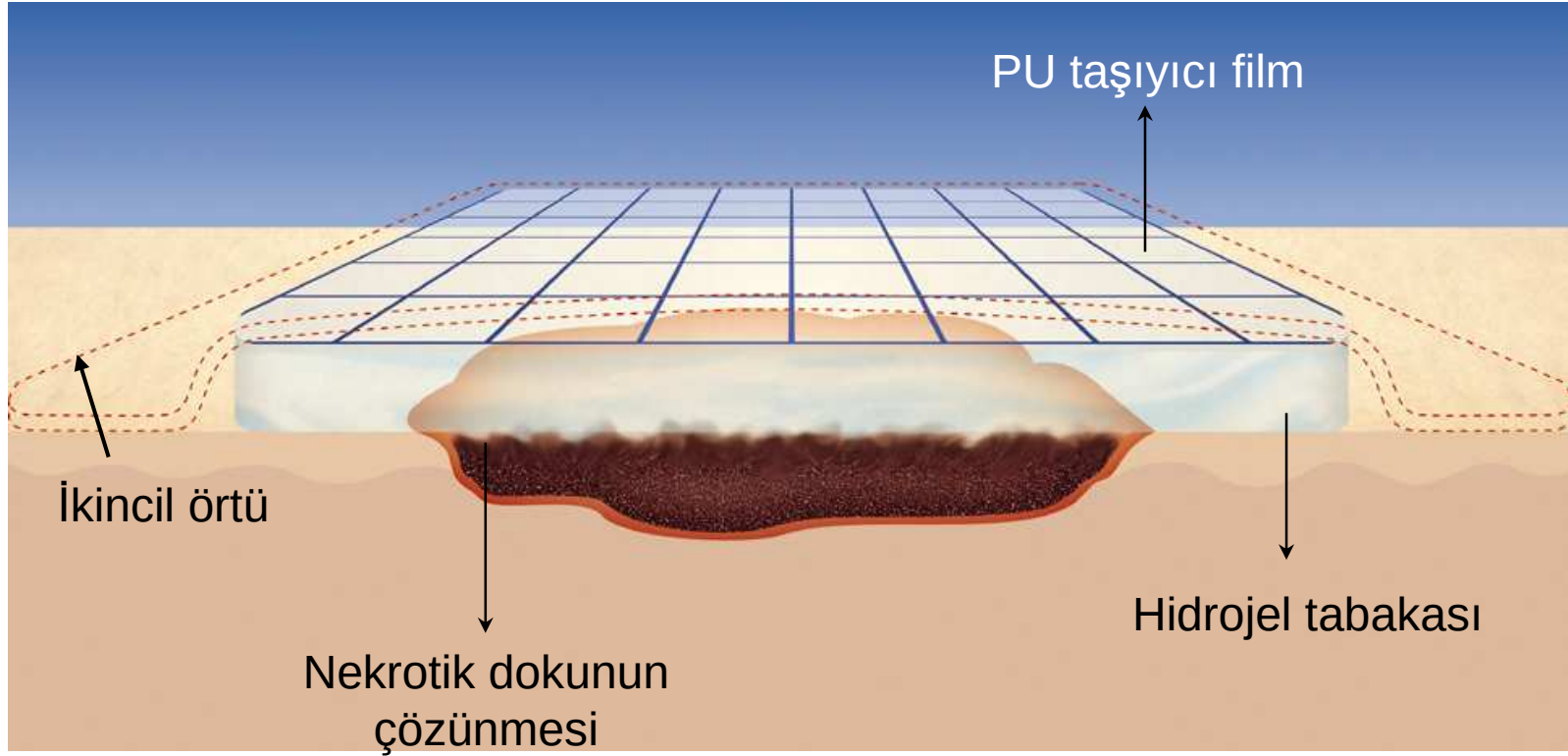

1. Kuru nekrotik doku, hidrojel tabaka tarafından nazıkçe yarılarak çözülür.
2. Yarı-geçirgen poliüretan film, bakteri ve sıvıların yaraya geçişini engeller.



Suprasorb® G Jel Sargı

Ürün avantajları

- Yarayı nemli tutması
- Kolay uygulanması
- Serinletme etkisi
- Yaraya yapışmadan travmasız sargı değişimi
- Şeffaf yapısı sayesinde, yaranın gözlenebilmesi
- Soğutma etkisi ile analjezik aktivite göstermesi
- Yumuşayan nekrotik dokunun jel yapının içine emilmesi ve sargıyla birlikte yaradan uzaklaşabilmesi





Suprasorb® G Jel Sargı


Kullanım yeri

- Nekrotik veya kuru-az akıntılı
- Yüzeysel,
- Enfekte olmamış yaralarda ve yüzeysel yanıklarda





Suprasorb® G Jel Şırınga

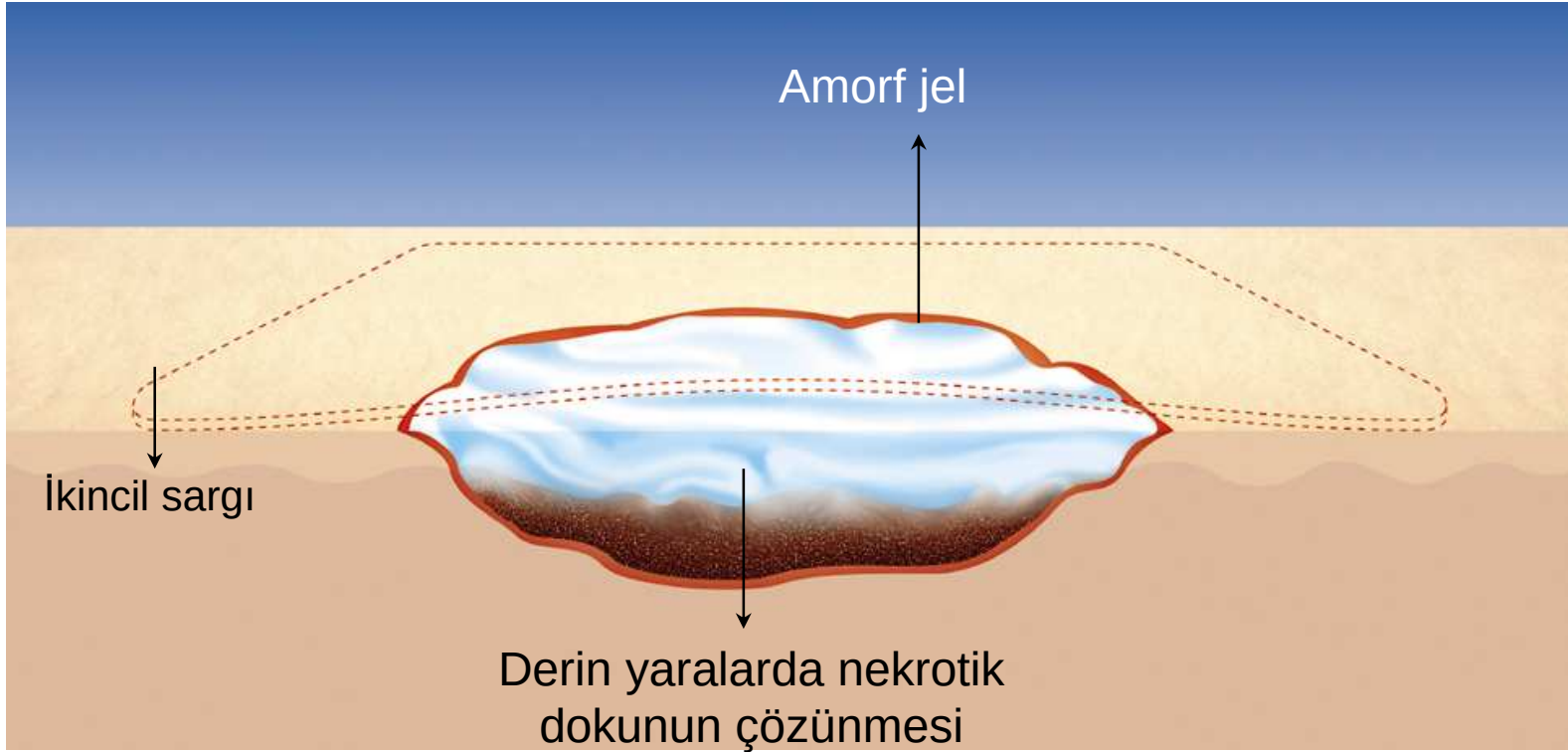

1. Kuru nekrotik doku, hidrojel tabaka tarafından nazikçe yaradan çözülür.
2. Derin yaralarda rahatça uygulanması için enjektör ambalajda sunulmaktadır.



Suprasorb® G Jel Şırınga

Ürün Avantajları

- Yüksek su içeriği (%96)
- Şeffaf olması
- Optimum viskozite, uygulamayı kolaylaştıran kıvamı
- Serinletme etkisi
- Kullanımı kolay şırınga formlu ambalajı
- Acısız sargı değişimi





Suprasorb® G Jel Şiringa

Kullanım yeri

- Nekrotik veya az akıntılı enfekte olmamış derin yaralar






Suprasorb

Modern Yara Tedavi Ürünleri





Suprasorb® C Kollajen Yara Örtüsü

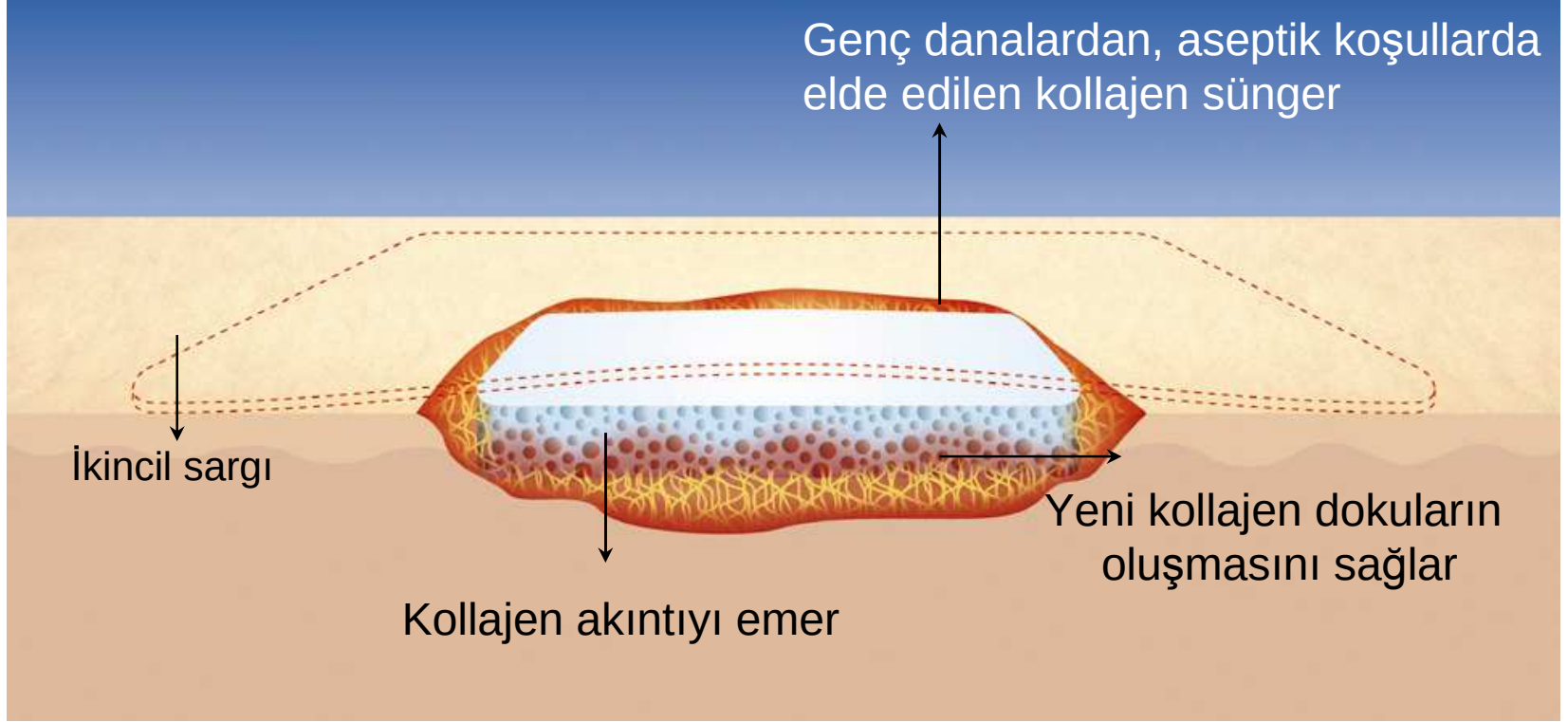



Suprasorb® C Kollajen Yara Örtüsü

Ürün avantajları

- Yüksek miktarda eksüda, nekrotik materyal ve fiber tabakayı emme
- Granülasyon dokusunun oluşumunu hızlandırma
- Yara dokusunun yenilenmesini hızlandırma
- En az yara izi bırakacak şekilde iyi kozmetik sonuçlar bırakarak yaranın tedavisini destekleme



Kurtsan Medikal



Suprasorb® C Kollajen Yara Örtüsü

Ürün avantajları

- Debridman sonrası oluşan hafif kanamayı durdurma
- Granülasyon dokusunun oluşumunu hızlandırma
- Jel oluşumu ile yaranın nemli kalmasını sağlama





Suprasorb® C Kollajen Yara Örtüsü

Kullanım yeri

- Tüm eksüdasyon derecesindeki yaralar için kullanılabilir. Ör:
 - Çeşitli orijinli ülserler
 - Yanıklar
 - Cerrahi doku kayıpları
- Fiziksel ve biyolojik hemostaz (kanamayı durdurma)



Kullanım kolaylığı:

Az akıntılı yaralarda, Suprasorb C Kollajen Yara Örtüsü, serum fizyolojik (salin solüsyonu) ile nemlendirerek kullanılabilir.



Kurtsan Medikal